

Déballage et Installation


La livraison doit comprendre :

- Le chariot Emma
- Le chargeur correspondant
- Les éventuelles options (Accessoires, paniers, lecteurs ...)

En cas d'erreur entre la livraison et le bon de livraison, merci de vous rapprocher de Decide Life.

Installation du chargeur :

Pour une utilisation optimale, le chargeur est à fixer au mur, à proximité d'une prise électrique à 110 cm du sol et dans l'axe du point de connexion d'Emma.

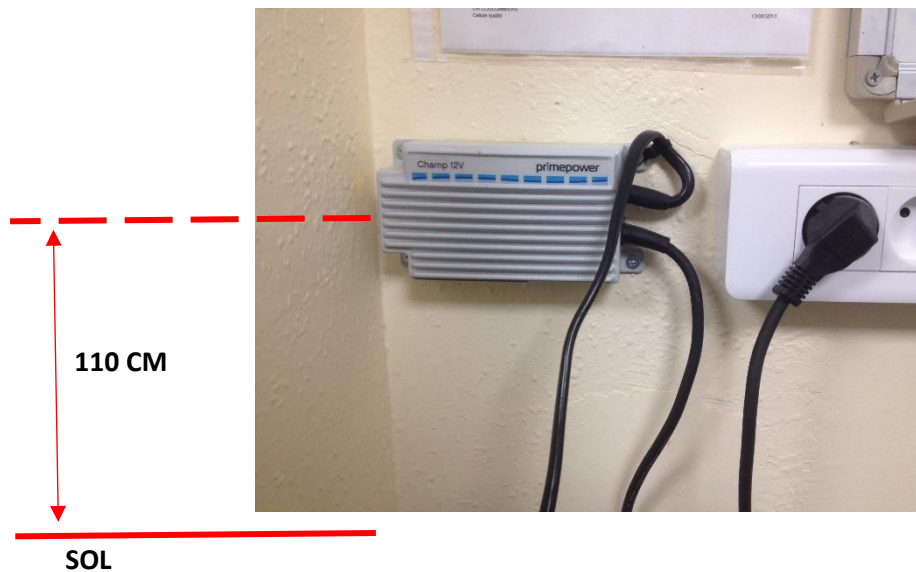

Pour brancher le chargeur, merci de vous assurer que les prises électriques soient reliées à la terre dans les conditions de sécurité électrique contrôlée suivant les normes en vigueur.

Le chargeur doit être vissé au mur par les quatre œillets. Le câble d'alimentation du chariot doit être sécurisé comme illustré ci-joint :



Le chargeur possède un indicateur permettant de visualiser la charge :

- LED orange + verte : Le chargeur ne délivre pas la charge.
- LED orange : Le chargeur délivre la charge



La connexion du chargeur se fait sur la partie arrière du chariot.

Attention à respecter le sens de branchement et à ne jamais forcer

**Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation
pour débrancher l'appareil.**