



EMMAT

“ Fiche d'utilisation
pour le personnel médical ”

RÉGLAGES ÉCRAN



1 Régler l'inclinaison de l'écran, tout en tirant sur la poignée d'indexage

2 Dévisser la poignée de verrouillage
Décaler la poignée en la tirant vers l'extérieur si l'accès y est difficile

3 Régler le mât à la hauteur souhaitée et resserrer la poignée

MISE EN CHARGE

1



Prendre les parties mâle et femelle du chariot et du chargeur

2



Branchez-les ensemble

3



En charge

voyant orange du chargeur allumé

4




Chargé

orange et vert allumé

DIGICODE

1

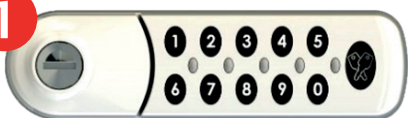


Taper le code une fois

2



Ouvrir le digicode : tiroir déverrouillé

3

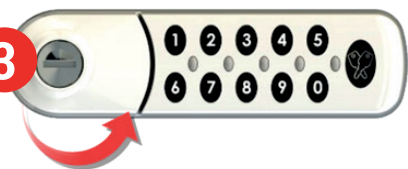

Fermer le digicode : tiroir verrouillé

DECIDE Life (FR)

23 rue René Cassin 74240 Gaillard

+33 (0)6 23 53 00 44 - www.decide-life.com