


5

1. Choisir le cadenas en haut pour le code de l'écran/tablette.
2. Taper le code choisi deux fois de suite pour validation.

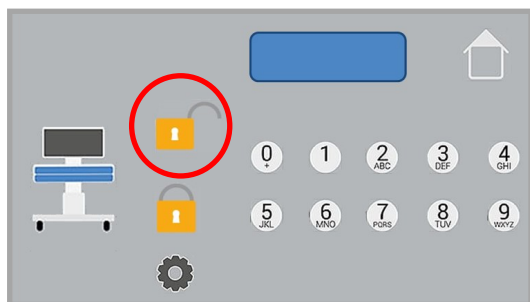

Vos mots de passe sont maintenant configurés



DECIDE Life Distribution
23 Rue René Cassin 74240 GAILLARD
Tél : +33 (0) 4 50 95 04 68
Fax : +33 (0) 4 50 35 09 48
emma@decidelife.ch
www.decide-life.com



EMMA Lift






Guide #2

Paramétrage du digicode *Pour le service informatique*

Pour plus d'information voir sur
www.decidelife.fr

1

1. Allumage du pavé tactile.
2. Cliquer sur le symbole  puis sur  pour accéder au menu paramétrage du digicode.

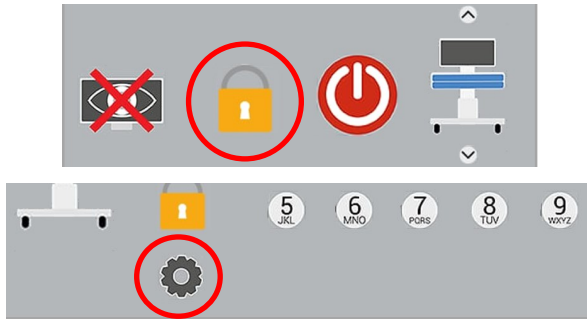

2

1. Taper le code administrateur -11335577- une seule fois. Pas de validation nécessaire.
2. En cas d'erreur, recommencer avec les bons chiffres.



3

Affichage du menu d'enregistrement des codes.

Code verrouillage écran/tablette



Code verrouillage tiroirs

4

1. Choisir le cadenas en bas pour le code des tiroirs.
2. Taper le code choisi deux fois de suite pour validation.

